

ステアチェア®

STAIR CHAIR SC-3

⑥
画像情報

● 狭小的空间也可使用！

● 一个人操作即可安全的上下楼梯！

⑤ 特徴

节省收纳空间
不需要收藏空间
一键折叠式



创造有梦想有新意有构思的产品

株式会社サンワ

追求安全性和轻松的操作性

安全性

手指只要松开开关，电磁刹车即生效，当场停车，无需担心下降

特殊设计的橡胶履带可以紧紧的抓住楼梯

安全带可以牢牢的固定住乘坐者的胸部和脚部，防止其跌倒

在平地上，只需用手轻推，利用四个车轮即可行走

电池采用的是无需补水。不会泄露液体的无需保养的电池

电池交换一键即可完成

操作性
管理

收纳

其他


一键即可折叠、不需要收纳空间

标准装备配备了可防止充电过度的充电器

配有防止灰尘的车套

可以使用的楼梯尺寸

单位:mm

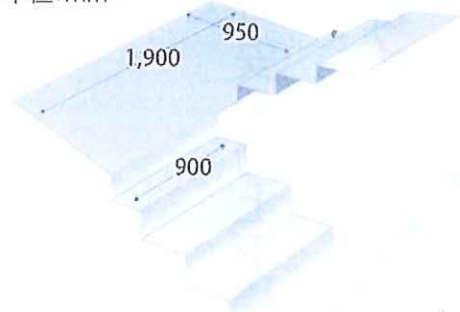

只要大于以上尺寸，即可使用。

在潮湿易滑得楼梯上不能使用

规格

名称	STAIR CHAIR
型式	SC-3
尺寸	全长(mm) 1,292(收纳时1,085) 全宽(mm) 413(收纳时413) 全高(mm) 929(收纳时498)
最大体重(kg)	130(1名)
重量(kg)	48(含电池)
发动机/输出	DC12V/210W(30分定格)
电池	12V-17Ah
使用时间	约30分/充满一次电后
速度	上楼梯 约20段(6.0m)分/最大体重时 下楼梯 约34段(10.2m)分/最大体重时
楼梯最大角度	35°
制动方式	停车制动(电磁刹车)
标准配件	防过度充电充电器・车套
TAIS编码	00412-000011

为了改良产品，可能在未通知的情况下改变规格。

操作者的条件

年龄：16岁以上70岁以下

病历：没有因发作性疾病等晕倒的情况

身高：150cm以上

体重：45kg以上

平衡感觉：可以背对着楼梯上楼

四肢状况：双手、双腿可自由活动

听觉・视觉：听觉、视觉没有问题

使用环境

楼梯的形状：螺旋状楼梯、弯曲楼梯不可使用

楼梯的角度：35度以内

楼梯宽：900mm以上

平台宽：950mm以上

・梯级凸缘间的距离在340mm以下

踏步高度在180mm以下

・踏口没有损坏，且不是圆形的

・防滑带没有偏移。

其他

使用者的条件：无

禁止事项：未接受本产品操作培训的人，不能进行操作。

培训概要：经销商负责操作培训，可接受培训者有一定的条件。

株式会社サンワ

①销售价格 520,000円(税別)

中国销售代理

北京鹤逸慈老年生活用品有限公司



- 本社/東京
- 工場/狭山 仙台
- URL <http://www.sunwa-jp.co.jp>

地址：北京市西城区西直门南小街国英园7号楼7-2

电话：010-66255162

传真：010-66255162

网址：www.heyici.com

BARRIER FREE 无障碍电动爬楼车

单页管理编号

F15-06

ISO 9001
认证商品

ステアシップ® STAIR SHIP TRE-52

Sunwa

电动/手动轮椅兼用 楼梯升降车

在较小的空间，在楼梯上均可轻松的回旋！

轻便型电动爬楼车，无需施工！

最大荷重
200kg



④画像情報



适用于

学校、公共设施……

④傾斜者

创造有梦想有特点有新意的商品

株式会社サンワ

⑤ 特徴

安全、安静、简单
在平地手动 在楼梯上电池驱动!



安全性


- 上下楼梯时，操作人员只需将手松开开关，电磁刹车即生效，车体当场自动停止。
- 安全带如果没有系牢，升降开关不会启动。
- 按下紧急停止按钮，可紧急停车。

功能性


- 上下楼梯时，本体平台接近水平的状态，不会让乘车者感到不安
- 电池为密闭式/无需保养
- 充电为100V电源 充满电后自动切断电源

可以使用此产品的楼梯规格 (mm) ⑥

※不能在曲线楼梯、潮湿楼梯上使用
※根据轮椅的种类，可能会出现不能使用的情况

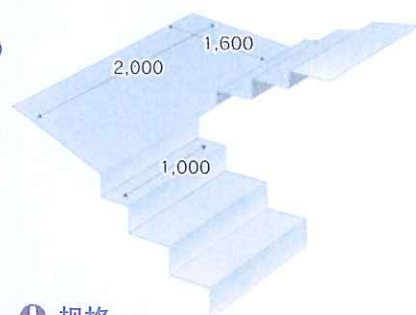

④ 可搭载附电动辅助部件的轮椅


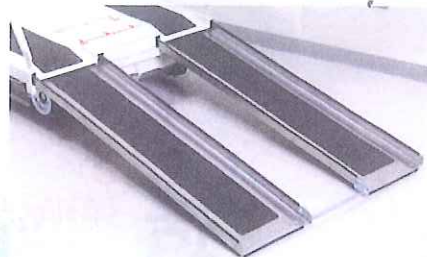


④ 收纳式坡道

④ 车体尺寸图 (mm)



④ 车把开关/操作板

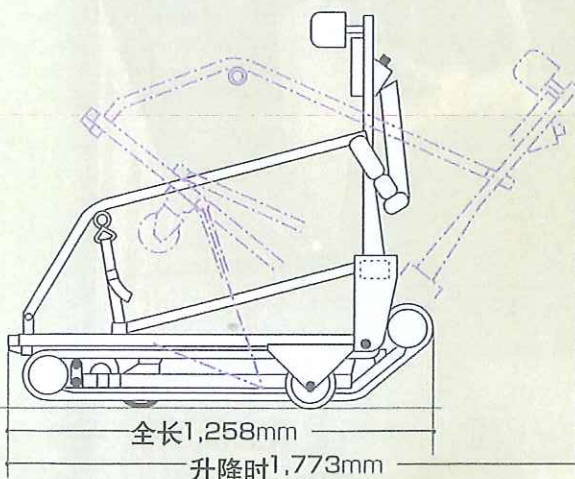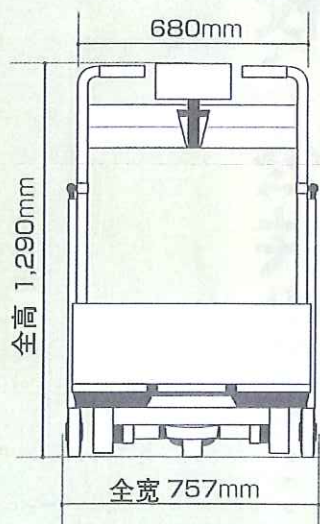

④ 规格

名称 ②		STAIR SHIP
型号 ③		TRE-52
主要尺寸	全 长 (mm)	1258
	全 宽 (mm)	757
	全 高 (mm)	1290
	平台高度 (mm)	235
	平台倾斜角 (°)	约40
功能	坡道角度 (°)	11
	制 动 装 置 (刹车)	无励磁型电磁刹车
	上下楼速度 (m/min)	约24段/分 (约7.5m)
	下降时速度 (m/min)	约35段/分 (约11.0m)
	楼梯最大角度 (°)	35
发动机	型 式	永久磁石式直流发动机
	输 出 功 率	110W/30分×2个
	电 池 类 型	小型密封铅蓄电池
	电 池 容 量	24V-24Ah/20hr (12V/2个直列)
	充 电 器	附电子计时器自动充电器
车 轮	充电一次可使用的时间	约40分钟
	前 轮 (mm)	φ 125×1个
	后 轮 (mm)	φ 150×2个
	轴 距 (mm)	505/445
	轮 距 (mm)	688
驱 动 带	宽 (mm)	50mm×2
	接地长 (mm)	900
	轮 距 (mm)	524
重 机 器 重 量 (kg)		115
量 最大承载 量 (kg)		200

※因产品改良可能出现事先未通知而变更规格

中国销售代理

北京鹤逸慈
老年生活用品有限公司
地址:北京市西城区西直门南
小街国英园7号楼7-2
电话:010-6625-5162
传真:010-6625-5162
网址:www.heyici.com

株式会社サンワ



■ 本社営業部 / 〒350-1325 埼玉県狭山市根岸571
■ 仙台支店 / 〒981-3408 宮城県黒川郡大町松坂平8-3-11
■ 西日本営業所 / 〒672-8071 兵庫県姫路市飾磨区隅2-126
■ 工 場 / 狭山・仙台
■ 本 社 / 東京

① 参考価格 138,000 円 (税別)

TEL.04-2954-6611 (代) FAX.04-2954-6617
TEL.022-347-2741 FAX.022-347-2740
TEL.079-231-1005 FAX.079-231-1006
URL <http://www.sunwa-jp.co.jp> E-mail: sangyo@sunwa-jp.co.jp

国内総発売元 アビリティーズ・ケアネット(株)

紧急用楼梯避难车

⑤ 特徴 用于地震・火灾 等灾害时避难!



地震・火灾等灾害时，在不能使用电梯的情况下，最少一个人即可把步行困难人员快速、安全从楼上转移！（推荐2个人操作）

④ 使用対象者

⑤ 特徴 在走廊迅速移动，安全下楼避难!

⑥ 画像情報
在下楼过程中
也可停止。

在平地的移动
也很简单。


下楼速度等同于
一般的避难速度。



下楼过程中，只需松开刹车控制杆，即可在楼梯上停车。






一键操作，让处于折叠状态的车体恢复使用。在平地上，利用6个车轮轻松前行。

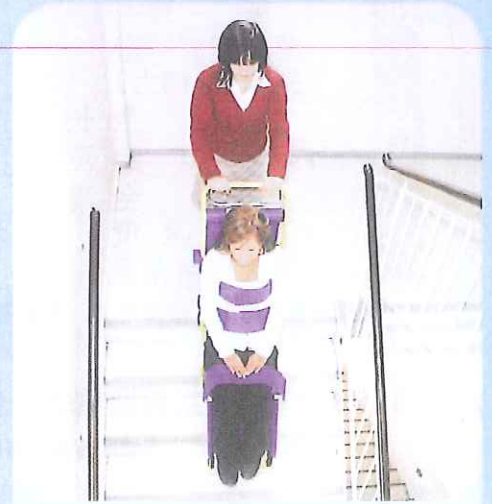

楼梯下降的速度几乎是一定的。接近普通人的避难速度。

⑦ 画像情報
説明

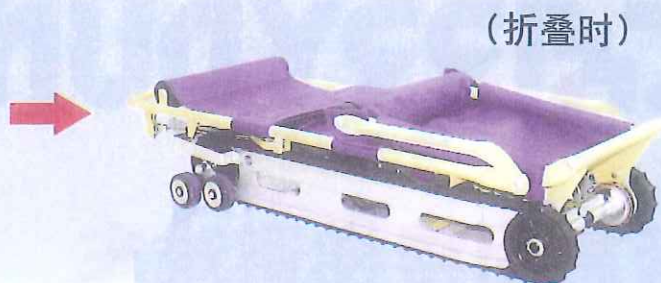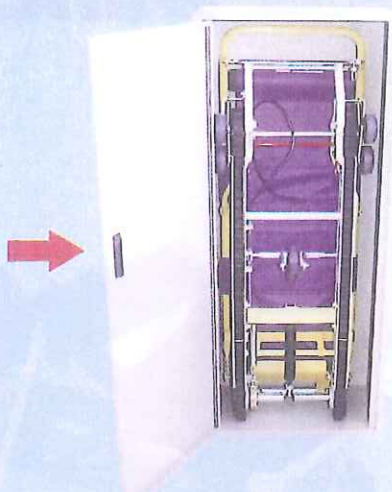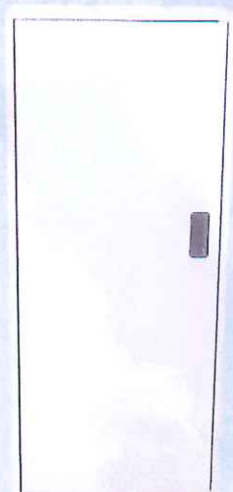

专用收纳柜 (另售)
尺寸 1150×510×280

特
长

- ◆ 低重心・长履带，卓越的平衡设计。
- ◆ 只需松开刹车接触控制杆，在楼梯的中途也可安全停车。
- ◆ 特殊设计的车轮和橡胶履带可适用于多种素材的楼梯。
- ◆ 虽然需要训练，但是并不需要特殊技术。
- ◆ 备有专用收纳柜 (另售)。

日本国内用户

国会议事堂・总务省东北综合通信局・国会图书馆・东京国际广场・品川区・千代田区・板桥区・带广市保健中心・京王广场大酒店・龟田康复医院・三井住友海上火灾保险・损害保险日本・鹿岛建设・丰田汽车・京王百货店・夏普・富士胶卷・富士复印机・西武信用金库・佳能・日立制作所・埃克森美孚公司・圣路加公馆・东京电力・村田制作所・雅马哈发动机・日本电气・DUSKIN・东芝・索尼・Landmark Tower69F・皇家公园大酒店・东レ株式会社 等其他


国外用户

US国防省・US教育省・US法务省・US沿岸警备队・US陆军・联邦调查局 (FBI)・联邦航空局・洛杉矶市・西雅图市・旧金山教育委员会・纽约市立学校・加利福尼亚大学・华盛顿邮局・波音公司・福特汽车・微软・可口可乐・百事可乐・北美白产・蒂芙尼・美国运通・洛克希德马丁・GM・GE・英特尔公司・德国大众汽车公司 等其他

顺序不同・敬称略

规格	② 名称	型号	carrydun
	定员	1名	
	最大对应体重	135kg	
	重量	20kg	
	速度控制构造	液压式减震器	
	刹车(楼梯上)	叉杆式手动刹车	
	尺寸	全长	1310mm(使用时)1100mm(折叠时)
		全宽	426mm(使用时)426mm(折叠时)
		全高	810mm(使用时)270mm(折叠时)
下楼速度	※约0.8米/秒(体重90kg・角度35°)		
最大使用角度	40°		

可使用的平台尺寸 (mm)

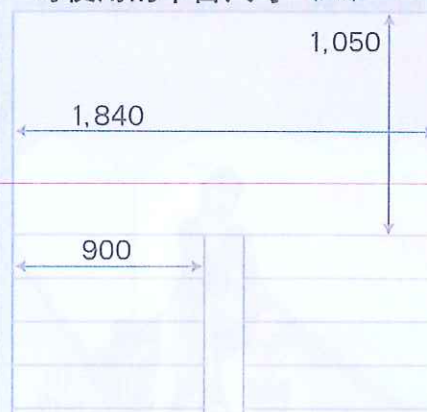

※根据乘坐者的体重、楼梯角度，下楼速度会发生改变。

因改良产品，可能会出现未事先通知而更改规格。

中国销售代理 北京鹤逸慈老年生活用品有限公司
地址：北京市西城区西直门南小街国英园7号楼7-2

①参考价格 168,000円 (日本価格)
电话：010-6625-5162 网址：www.heyici.com
传真：010-6625-5162

株式会社サンワ

创造有梦想有新意有构思的产品



■ 本社 営業部 / 〒350-1325 埼玉県狭山市根岸571
■ 仙台支店 / 〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平8-3-11
■ 西日本営業所 / 〒672-8071 兵庫県姫路市師匠区橋2-126
■ 工場 / 狭山・仙台
■ 本社 / 東京

TEL.04-2954-6611 (代) FAX.04-2954-6617
TEL.022-347-2741 FAX.022-347-2740
TEL.079-231-1005 FAX.079-231-1006

URL <http://www.sunwa-jp.co.jp>