

BARRIER FREE 可搬型階段昇降機

カタログ管理番号

F14-12

ステアチェア®

STAIR
CHAIR

SC5-2

SUNWA

エレベーターを利用できないところでの階段移動に…
災害時の避難にも利用できます

◀ 階段はバッテリー走行

▼ 踊り場では手動で旋回



可搬型階段昇降機は
設置工事不要

夢のあるユニークなアイデア製品を創り出す

株式会社サンワ

安全性と操作性に優れたクローラータイプ

安全性

- スイッチから指を離せば電磁ブレーキの働きでその場で停止 下降する心配がありません
- 特殊設計のゴムクローラーが階段をしっかりとグリップします
- 胸部・腹部・脚部固定ベルトが搭乗者の転落を防ぎます

操作性・管理

- 平地は 4 個の車輪で軽く手押し走行ができます
- バッテリーは補水・液モレのないメンテナンスフリーバッテリーを採用
- バッテリーパックはワンタッチで交換できます

収納・その他

- ワンタッチで折りたたみができ 収納スペースをとりません
- 常時充電式充電器を標準装備
- ホコリ対策用に車体カバーを標準装備



● 介護保険レンタルでご利用の場合

操作者の条件

- 年 齢：原則16才以上70才以下である
- 病 歴：発作性の病気を持っていないこと
- 身 長：原則150cm以上
- 体 重：原則45kg以上


- 平衡感覚：階段を後ろ向きに上ることができる
- 四肢の状況：両手・両足に不自由がないこと
- 聴覚・視覚：特に聴覚・視覚に問題がないこと

その他

- 利用者の条件：特になし
- 禁止事項：▲本製品は操作講習を受けていない方は、操作できません。
- 講習の概要：操作講習は貸与事業者が行いますが、受講できる方には条件があります。

● 許容階段寸法

単位:mm

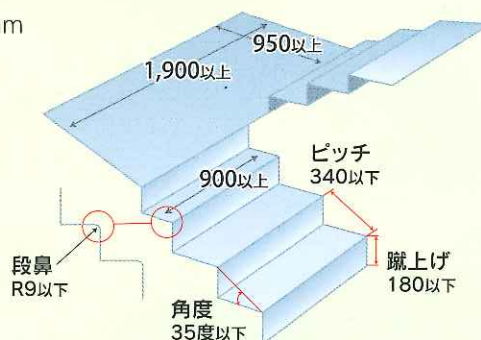

踊り場が上記寸法以上であれば使用可能です。
※濡れたりしてすべりやすい階段では使用できません。

● 仕 様

名 称	ステアチェア
型 式	SC5-2
機 体 寸 法	
全 長 (mm)	1,292 (収納時 1,085)
全 幅 (mm)	413 (収納時 413)
全 高 (mm)	929 (収納時 498)
最大荷重 (kg)	130 / (1名)
重 量 (kg)	48 (バッテリーパック含む)
モーター／出力	DC12V / 210W (30分定格)
バ ッ テ リ ー	12V-17Ah
使 用 時 間	約 30分 / 一充電当り
速 度	
階 段 上 昇	約 20段 (6.0m) 分 / 最大体重時
階 段 下 降	約 34段 (10.2m) 分 / 最大体重時
最大階段角度	35°
制 御 方 式	駐車制動 (電磁ブレーキ)
標 準 装 備 品	常時充電式充電器・車体カバー
T A I S コード	00412-000011

この仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

使用環境の条件	階段傾斜角度	35度以下
	段鼻間の距離	340mm 以下
	段鼻 R	R9mm 以下
	蹴上寸法	180mm 以下
	■ らせん階段・曲がり階段でないこと	
	■ 段鼻に欠けがないこと	
	■ すべり止めモールがある場合 確実に固定されていること	
	■ 濡れて滑りやすい状態や油脂が付着・凍結した階段では使用しないこと	

※本製品は操作講習を受けていない方は操作できません。

株式会社サンワ

U R L ▶ <http://www.sunwa-jp.co.jp>
E-mail ▶ sangyo@sunwa-jp.co.jp



- 本社営業部 / 〒350-1325 埼玉県狭山市根岸571 TEL.04-2954-6611 (代) FAX.04-2954-6617
- 西日本営業所 / 〒672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構2-126 TEL.079-231-1005 FAX.079-231-1006
- 工 場 / 狭山・仙台
- 本 社 / 東京

2018.11.3000CP