

BARRIER FREE 可搬型階段昇降機

カタログ管理番号

F14-13

SUNWA

SC6

ステアチェア

エレベーターを
利用できないところでの階段移動に
災害時の避難にも利用できます。


「介護保険
レンタル」
対象品



可搬型階段昇降機は
設置工事不要



階段はバッテリー走行

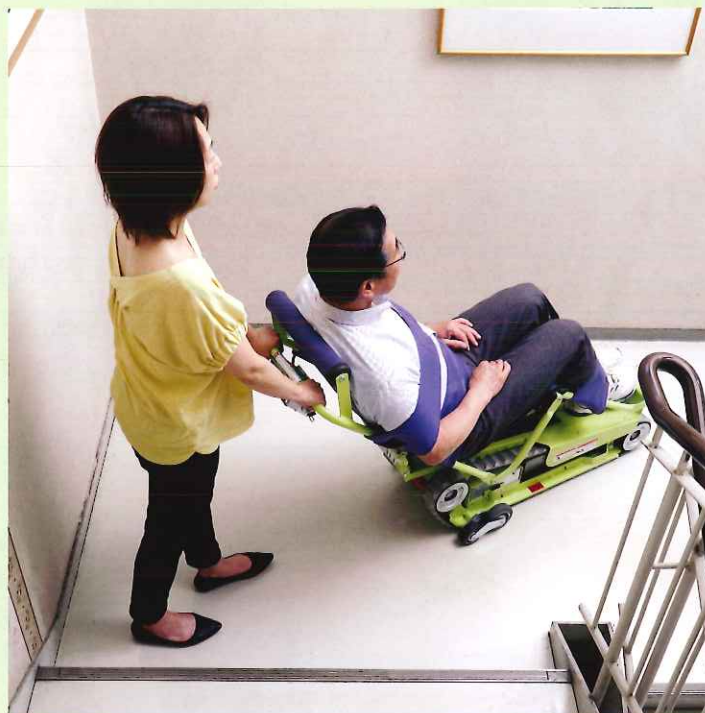

踊り場では手動で旋回

安全性と操作性に優れたクローラータイプ

安全性

- スイッチから指を離せば電磁ブレーキの働きでその場で停止 下降する心配がありません
- 特殊設計のゴムクローラーが階段をしっかりとグリップします
- 胸部・腹部・脚部固定ベルトが搭乗者の転落を防ぎます

操作性・管理

- 平地は4個の車輪で軽く手押し走行ができます
- バッテリーは補水・液モレのないメンテナンスフリーバッテリーを採用
- バッテリーパックはワンタッチで交換できます

収納・その他

- ワンタッチで折りたたみができ 収納スペースをとりません
- 常時充電式充電器を標準装備
- ホコリ対策用に車体カバーを標準装備



● 介護保険レンタルでご利用の場合

操作者の条件

- 年 齢：原則16才以上70才以下である
病 歴：発作性の病気を持っていないこと
身 長：原則150cm以上
体 重：原則45kg以上


- 平衡感覚：階段を後ろ向きに上ることができる
四肢の状況：両手・両足に不自由がないこと
聴覚・視覚：特に聴覚・視覚に問題がないこと

その他

- 利用者の条件：特になし
禁止事項：▲本製品は操作講習を受けていない方は、操作できません。
講習の概要：操作講習は貸与事業者が行いますが、受講できる方には条件があります。

● 許容階段寸法

単位:mm

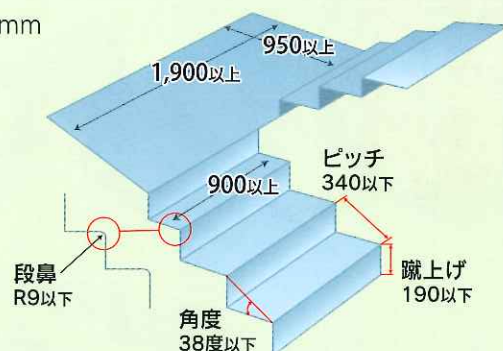

踊り場が上記寸法以上であれば使用可能です。
※濡れたりしてすべりやすい階段では使用できません。

● 仕 様

名 称	ステアチェア
型 式	SC6
機 体 寸 法	全 長 (mm) 1,346 (収納時 1,100)
	全 幅 (mm) 421 (収納時 421)
	全 高 (mm) 890 (収納時 482)
最大荷重 (kg)	130 / (1名)
重 量 (kg)	49 (バッテリーパック含む)
モ ー タ ー	永久磁石式直流モーター 1個
ブ レ ー キ	無励磁作動型電磁ブレーキ 1個
バ ッ テ リ ー	小型制御弁式鉛蓄電池 (PXL12180) または (PE12V17)
自 動 充 電 器	入力: AC100V-50-60Hz 出力: DC12V-5A
使 用 時 間	約 30 分 / 一充電当り
速 度	階 段 上 昇 約 22 段 (6.7m) / 分 (搭乗者130kg時)
	階 段 下 降 約 33 段 (10.2m) / 分 (搭乗者130kg時)
最大階段角度	38°
T A I S コード	00412-000015

この仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

使用環境の条件	階段傾斜角度 38度以下
	段鼻間の距離 340mm 以下
	段鼻 R R9mm 以下
	蹴上寸法 190mm 以下
	■ らせん階段・曲がり階段でないこと
	■ 段鼻に欠けがないこと
	■ すべり止めモールがある場合 確実に固定されていること
	■ 濡れて滑りやすい状態や油脂が付着・凍結した階段では使用しないこと

※本製品は操作講習を受けていない方は操作できません。

株式会社サンワ

U R L ▶ <http://www.sunwa-jp.co.jp>
E-mail ▶ sangyo@sunwa-jp.co.jp



- 本 社 営 業 部 / 〒350-1325 埼玉県狭山市根岸571 TEL.04-2954-6611(代) FAX.04-2954-6617
■ 西日本営業所 / 〒672-8071 兵庫県姫路市飾磨区橘2-126 TEL.079-231-1005 FAX.079-231-1006
■ 工 場 / 狭山・仙台
■ 本 社 / 東京

2019.6.3000CP