

BARRIER FREE 可搬型階段昇降機 ステアチエア

カタログ管理番号
F14-13

Sunwa
SC6

エレベーターを
利用できないところでの階段移動に
災害時の避難にも利用できます。

「介護保険
レンタル」
対象品



可搬型階段昇降機は
設置工事不要



階段はバッテリー走行



踊り場では手動で旋回

安全性と操作性に優れたクローラータイヤ

安全性

- スイッチから指を離せば電磁ブレーキの働きでその場で停止 下降する心配がありません
- 特殊設計のゴムクローラーが階段をしっかりとグリップします
- 胸部・腹部・脚部固定ベルトが搭乗者の転落を防ぎます

操作性・管理

- 平地は 4 個の車輪で軽く手押し走行ができます
- バッテリーは補水・液モレのないメンテナンスフリーバッテリーを採用
- バッテリーパックはワンタッチで交換できます
- ワンタッチで折りたたみができ 収納スペースをとりません
- 常時充電式充電器を標準装備
- ホコリ対策用に車体カバーを標準装備

収納・その他



●介護保険レンタルでご利用の場合

操作者の条件

年齢 原則16才以上70才以下である
 病歴 発作性の病気を持っていないこと
 身長 原則150cm以上
 体重 原則45kg以上


平衡感覚：階段を後ろ向きに上ることができる
 四肢の状況：両手・両足に不自由がないこと
 聴覚・視覚：特に聴覚・視覚に問題がないこと

その他

利用者の条件：特になし
 禁止事項：▲本製品は操作講習を受けていない方は、操作できません。
 講習の概要：操作講習は貸与事業者が行いますが、受講できる方には条件があります。

●許容階段寸法

単位:mm

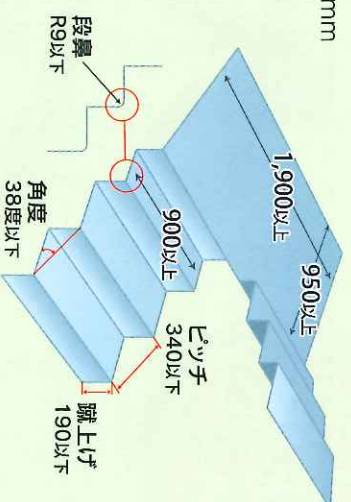

踊り場が上記寸法以上であれば使用可能です。
 ※濡れたりしてすべりやすい階段では使用できません。

●仕様

名 称	スチアチェア S C 6
機 体 寸 法	全 長 (mm) 1,346 (収納時 1,100)
	全 幅 (mm) 421 (収納時 421)
	全 高 (mm) 890 (収納時 482)
最大荷重 (kg)	130 / (1名)
重量 (kg)	49 (バッテリー・パック含む)
モーター	永久磁石式直流モーター 1 個
ブレーキ	無励磁作動型電磁ブレーキ 1 個
バッテリー	小型制御弁式鉛蓄電池 (PXL12180) または (PE12V17)
自動充電器	入力: AC100V-50-60Hz 出力: DC12V-5A
使用時間	約 30 分 / 一充電当り
速度	階段 上昇 約 22 段 (6.7m) / 分 (搭乗者 130kg 時)
度	階段 下降 約 33 段 (10.2m) / 分 (搭乗者 130kg 時)
最大階段角度	38°
T A I S コード	00412-000015

この仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

使用環境の条件

階段傾斜角度	38 度以下
段鼻間の距離	340mm 以下
段鼻 R	R9mm 以下
蹴上寸法	190mm 以下
■ らせん階段・曲がり階段でないこと	
■ 段鼻に欠けがないこと	
■ すべり止めモールがある場合 確実に固定されていること	
■ 濡れて滑りやすい状態や油脂が付着・凍結した階段では使用しないこと	

※本製品は操作講習を受けていない方は操作できません。

株式会社サンワ

U R L ▶ <http://www.sunwa-jp.co.jp>
 E-mail ▶ sangyo@sunwa-jp.co.jp



■ 本社営業部 / 〒350-1325 埼玉県狭山市根岸571
 ■ 西日本営業所 / 〒672-8071 兵庫県姫路市節徳区構2-126
 ■ 工場 / 狭山・仙台
 ■ 本社 / 東京

TEL.04-2954-6611(代) FAX.04-2954-6617
 TEL.079-231-1005 FAX.079-231-1006

2019.6.3000CP