

災害は必ずやってくる... 備えてますか?

あらゆるシーンで活躍する 階段対応搬送機器



商標登録第5996359号
意匠登録第1595822号

多くのメディアで取り上げられてる
話題の階段搬送機器

電動式階段昇降機 **UD-CHAIR™**
TAISコードNo. 01994-000001

電動式階段昇降機 **UD-CARRY™**

階段対応車イス **Best-Chair®**

病院/クリニック/福祉施設/老人ホーム/自治体/空港/公共交通機関
学校(小中校・大学・専門)/ホテル/マンション/スポーツ施設/デパート
レストラン/ショッピングモール/ミュージアム/アミューズメントパーク



UD-CHAIR



UD-CARRY



Best-Chair



動画で確認

※Best-Chairは下り専用 UDシリーズは昇降用



トライリンクス株式会社

Tri-Links Co., Ltd.

上層階への避難も考えていますか？

大規模災害などで上層階への物資搬送に！

電動式階段昇降機 UD-CHAIR™ UD-0119-101

電動式階段昇降機 UD-CARRY™ UD-0119-601

電動でラクラク移動

操作はとても簡単

軽量コンパクトで車にも積載できる

UD-CHAIR™ 導入理由

[本体セット] ¥680,000(税抜) ※1

災害・・・津波や河川の氾濫などの水害でエレベータが停止 要援護者の上層階への避難のために！
 日常・・・エレベータがない団地やマンションや玄関先の階段などでの昇り降りに使用！
 業務・・・病院・福祉施設などでの移動が容易に行える！ 介助者の負担軽減や業務が円滑に！



専用スタンド



UD-CARRY™ 導入理由

[本体セット] ¥420,000(税抜) ※1

災害・・・大規模災害などではエレベータが停止する
 このような事態が想定されるために上層階への大量物資の搬送が容易に行える！
 業務・・・エレベータがない建物での搬送やちょっとした荷物を上層階へ容易に運べる！



本体

折りたたみ



4点式固定ベルト



平行移動用ハンドル



ヘッドレスト



平行移動



階段昇降



クローラーで昇降



安全を考え二人で操作しましょう



※操作は必ず靴・スニーカーなど、すぐに脱げない履物で操作してください(サンダル・ハイヒールなどはNG)

外装

正面



折りたたみ



横




クローラー収納時



荷台

荷台サイズ

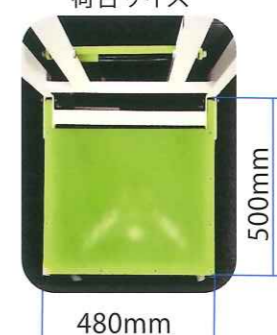

荷台の折りたたみ



裏面のバーを引き上げると折りたたむ

階段昇降



狭い階段でも昇降可能

操作パネル




※操作者および乗車される方はクローラーに巻き込まれるような服装は避けてください

UD-CHAIR™ / UD-CARRY™ 共用部

操作パネル (電源を入れて昇降ボタンを押しながら階段を昇り降り)

操作パネル(上段)

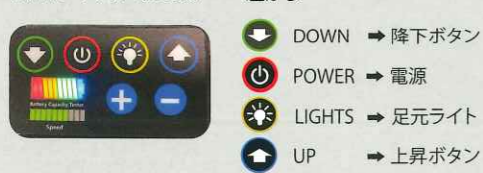

左から

- DOWN → 降下ボタン
- POWER → 電源
- LIGHTS → 足元ライト
- UP → 上昇ボタン

操作パネル(下段)



- スピード調整ボタン
- + スピード速い
- スピード遅い

※スピードは4段階 安全に配慮し一番遅い速度で操作して下さい

バッテリー残量バー



※充電は黄色のバー2から1本になったら充電を開始して下さい

バッテリー



バッテリー残量ランプ付き



ON/OFFスイッチ



脱落防止キー



※使用しないときはスイッチを必ずOFFにしてください

充電器

専用充電器



充電口に差し込んだ状態



充電中 充電完了

家庭用コンセント

クローラーペダル (ペダルを踏んでクローラーを引き出して階段を昇り降り)



※写真はUD-CARRY

バッテリー装着 (スライドして装着)

UD-CHAIR



UD-CARRY



※UD-CHAIRとUD-CARRYの装着位置は異なります

品番	UD-CHAIR™	UD-CARRY™
使用時寸法cm(W×H×D)	52×108×102	52×108×90
収納時寸法cm(W×H×D)	52×108×27	52×108×35
重量 / 最大積載重量	30.5kg / 120kg ※2	25kg / 120kg ※2
対応階段角度	27度~40度	
昇降速度	約4.5歩/分 ※4段階可変可能	
モーター	DC36V/15.6Ah	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー	
充電時間	約5~6時間 ※使用状況により異なる	
付属品	専用バッテリー/専用充電器/ヘッドレスト(UD-CHAIR)	
オプション	予備バッテリー/専用スタンド/ダストカバー(UD-CHAIR用)	

※2 最大積載重量はあくまで機器に乗車および搭載できる最大の重量です 操作する方ご自身の体力や乗車者の体重および積載重量を考慮し操作を行ってください

※1 表示価格は本体セット価格になります

※仕様および外観等の改良は予告なく変更する事が有りますのでご了承ください

階段避難車が進化した

階段対応車イス Best-Chair®

UD-0117-201

[本体セット] ¥240,000 (税抜) ※ 1

なぜBest-Chairが選ばれるのか?

階段対応車イスBest-Chairは多くのユーザー様の声を形にしました!

楕円形のパイプを採用 非力な方でもグリップ力が上がり 階段降下も安心して降りることができる!
 ハンドルの位置を低めに設定 小柄な方でもスムーズに操作が可能に!
 災害時以外でも 車椅子として使用できるので いざというときにも 操作を容易におこなえる!

強度をアップ
耐荷重が180kgに!



乗車される方への配慮

*アームレスト・フットレスト

階段を降りる恐怖心を少しでも取り除き安心して乗車いただけるよう設計



可倒式アームレスト

*シート

クッション性の良い素材を採用し長時間の居住性を追求



*シート

深さ調整もできて小柄な方でも座りやすい



シートの深さは3つのバックルでしっかり調整

*下肢固定ベルト

下肢麻痺がある方や不安な方には専用の固定ベルトを標準装備



下肢固定ベルト

下肢に震えのある方も安心

安全性や居住性を追求

操作される方への配慮

*楕円パイプ

楕円パイプを採用しグリップ力を重視



楕円パイプ断面図

*押手

後部に押手を設け車イスとしての操作性をアップ



*4輪移動

踊り場では4輪のまま転回ができるために操作が容易に

4輪のまま転回



Vベルトバー

*本体下部のVベルトで階段を揺れることなく降下する

Vベルトで降下



付属品



取外し可能な大型ポーチ

ファスナー付きダストカバー

オプション



専用スタンド

Best-Chair仕様

品番	フルセット BC-0117-101	本体セット BC-0117-201
使用時寸法cm (W×H×D)	495 × 1500 × 1030	
収納時寸法cm (W×H×D)	545 × 1030 × 220	
重量	15.3 kg	
対応階段角度	30度 ~ 40度	
耐荷重	180kg	
材質	本体: アルミ合金 / シート: PVC(難燃製)	
付属品	ダストカバー: 1/大型ポーチ: 1/フリー固定ベルト: 1/ 取扱説明書(保証書)/DVDマニュアル/簡易取説: 各1	
オプション	専用スタンド付き	専用スタンドなし

※階段での操作は特に危険が伴うために取扱説明書を熟知し訓練を行ったうえで使用ください

※操作は体力面も考慮し操作を行ってください(必ずしも誰もが操作出来る訳ではありません)

※原則2名以上で操作を行ってください

※ 1 表示価格は本体価格になります 仕様および外観等の改良は予告なく変更することがありますのでご了承ください

発売元

製品のお問い合わせは下記の取扱店にご確認ください

取扱店