

仕 様			
名 称	階段移動用リフト J-SEAT	階段昇降ユニット J-MAX + 専用車いす J-COMPACT	
型 式	JS1	JM1	JC1
本体外形 (全長×全幅×全高)	1090×485×1090mm	515×440×1095mm セーフティアーム長さを含む全長: 1030mm	850×530×920mm 折りたたみ時: 665×265×685mm
搭乗者最大体重	120kg		100kg
重量	40kg(バッテリー含む)	34kg(バッテリー含む)	12kg
段の高さ	最大210mm		—
段の奥行	最小210mm		—
昇降速度	無段階調整式(8~23段/分)		—
バッテリー容量	約300段(15-30階)の往復		—
標準装備	バッテリー、充電器、シートベルト、ヘッドレスト		背折れ、背張り調整、 フットレスト・アームレスト脱着、 シートベルト、クッション
TAISコード	00412-000016	00412-000017	00412-000018

※セーフティアームは階段の形状やサイズ、操作状況によっては有効に働かないことがあります。
 ※ご利用環境や操作される方には一定の条件があります。
 ※J-MAXとJ-COMPACTはセットでのご利用となります。
 ※この仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

操作者の条件	
年 齢	原則16歳以上、70歳以下
身 長	原則150cm以上
体 重	原則45kg以上
病 歴	発作性の病気などで倒れたことがない
四肢の状況	両手・両足に不自由がない
視覚聴覚	視覚や聴覚に問題が無い

操作される方は必ず当社規定の操作トレーニングを受けてからご使用下さい。

その他取扱い商品

介護保険レンタル対象



ステアエイド
SA-SW
可搬型階段昇降機

& 専用車いす
FG18



ステアチェア
SC6
可搬型階段昇降機

株式会社サンワ

U R L ▶ <http://www.sunwa-jp.co.jp>
E-mail ▶ sangyo@sunwa-jp.co.jp



- 本 社 営 業 部 / 〒350-1325 埼玉県狭山市根岸571 TEL.04-2954-6611(代) FAX.04-2954-6617
- 西日本営業所 / 〒672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構2-126 TEL.079-231-1005 FAX.079-231-1006
- 工 場 / 狭山・仙台
- 本 社 / 東京

2021.6.3000CP




階段移動用リフト

Stairclimber

介護保険レンタル対象

階段介助がらくらくに

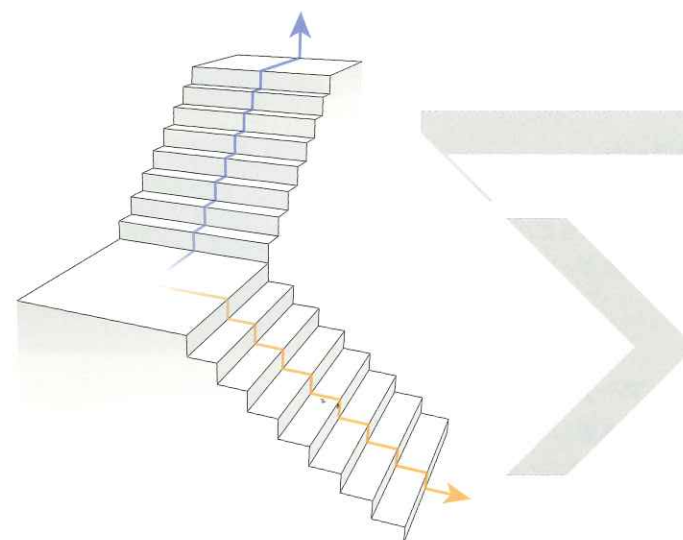

階段昇降ユニット

J-MAX

階段移動用リフト

J-SEAT

SUNWA

カタログ管理番号 F 27-01

J-MAXシリーズ

階段介護が介助者一人で安全・らくらくに

公営住宅や一軒家の玄関前などの階段介助でお困りの方に最適な階段移動用リフト。
身体的負担を減らし、介助者一人でも安全に安心して介助することができます。

特長（4つの安全装置）



グリップセンサ

ハンドルグリップの中に角度センサを内蔵。操作する際の適切な角度を介助者に振動で知らせてくれます。



セーフティブレーキ

階段のへりでは自動的に安全ブレーキが働き、滑り落ちる心配はありません。



L型昇降フット

L型の昇降フットを採用し、安定した昇降を実現。しっかりとバランスを保って操作できます。



セーフティアーム

万が一バランスを崩した場合も、しっかりとアームがロック。前方へ転落する心配はなく、安全に昇降する事ができます。(※1)



※1 階段の形状やサイズ、操作状況によって有効に働かないことがあります。

ラインナップ

J-MAXシリーズは、ご利用環境や身体状況、外出目的等に合わせて2つのタイプよりお選びいただけます。



J-SEATモデル 階段移動用リフト

狭い踊り場がある
階段にお住まいの方に
(コンパクトなシートタイプ)



J-MAX 階段昇降ユニット

& J-COMPACT 専用車いす

階段昇降後、着脱式の
車いすで移動ができます
デイサービスの送迎に便利

こんな場面で活躍します

一般家庭やデイサービスの送迎など、様々な場所で利用されています。

公営住宅など

共有部分で狭い踊り場と
急な階段があるところ



高台の一軒家など

玄関までに数段の
階段や段差があるところ



負担や不安があった



おんぶや抱っこをして




複数の介助者で車いすごとかかえて

外階段から居室まで



スロープが急で車いすでは大変

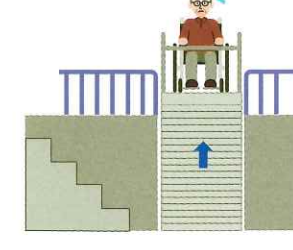

段差解消機では高すぎる

安全・快適に

J-MAXシリーズを使用することにより、
介助者の負担を少なくするとともに、
安全性も高まります。



外階段から居室まで

外階段から居室まで
スムーズに移動できます。
また上がり框に
踏み台を固定して
玄関でも使用できます。



取り付け方法（J-MAX + J-COMPACTのみ）

ピンを差し替えることにより、J-MAXとJ-COMPACTを簡単に着脱することができます。



車いすの後方からJ-MAXを近づけます。



最後までしっかりと装着します。



ピンを差し込み固定します。

コンパクトに分割・保管



工具を必要とせず、簡単にユニットを分解して、
車のトランクに積み込むことも可能です。
また、保管についても玄関など、省スペースで保管が可能です。