

J-SEATモデル

階段移動用リフト



狭い踊り場がある
階段にお住いの方に
(コンパクトなシートタイプ)

J-MAX & J-COMPACT

階段昇降ユニット

専用車いす



階段昇降後、着脱式の
車いすで移動ができます。
デイサービスの送迎に便利

STAIR AID

可搬型階段昇降機



階段昇降後、着脱式の
車いすで移動ができます。
デイサービスの送迎に便利

仕様

名 称	階段移動用リフト J-SEAT	階段昇降ユニット J-MAX + 専用車いす J-COMPACT		可搬型階段昇降機 ステアエイド + ステアエイド SA-SW専用車いす	
型 式	JS1	JM1	JC1	SASW-1	FG18
本 体 外 形 (全長×全幅×全高)	1,090×485×1,090mm	515×440×1,095mm セーフティアーム長さを 含む全長 1,030mm	850×530×920mm 折りたたみ時 665×265×685mm	1,453×644×903mm	1,015×670×890mm
最 大 荷 重	120kg	100kg	100kg	119kg	100kg
重 量	40kg(バッテリー含む)	34kg(バッテリー含む)	12kg	59kg(バッテリー含む)	19kg
段 の 高 さ	最大210mm	—	—	最大190mm	—
段 の 奥 行	最小210mm	—	—	—	—
階 段 角 度	—	—	—	35度	—
昇 降 速 度	無段階調整式(8~23段/分)	—	—	上昇:約19段/分 下降:約34段/分	—
T A I S コード	00412-000016	00412-000017	00412-000018	00412-000022	00412-000013

※セーフティアームは階段の形状やサイズ、操作状況によっては有効に働かないことがあります。 ※ご利用環境や操作される方には一定の条件があります。

※J-MAXとJ-COMPACTはセットでのご利用となります。 ※STAIR AIDは、専用車いすが標準装備されています。

※この仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

お気軽にお問い合わせください。

夢のあるユニークなアイデア製品を作り出す

株式会社サンワ <http://www.sunwa-jp.co.jp/>
e-mail:sangyo@sunwa-jp.co.jp

- 本 社 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-5
TEL:本社営業部(狭山工場)へご連絡ください
- 本 社 営 業 部 〒350-1325 埼玉県狭山市根岸571
TEL:04-2954-6611 FAX:04-2954-6617
- 西日本営業所 〒672-8071 兵庫県姫路市飾磨区橋2-126
TEL:079-231-1005 FAX:079-231-1006
- 工 場 狭 山

【代理店】

JQA-1978 狭山工場



カタログにはユニバーサルデザインフォントを使用しています。

ユニバーサルデザインフォントとは、目の不自由な人も含め、年齢、性別関係なく、
より多くの人が読みやすく、誤読されにくいように考慮した書体です。

— 可搬型階段昇降機 —

STAIR CHAIR

ステアチェア



介護保険
レンタル
対象品

SUNWA

階段の昇り降りを安心・安全に移送します。

階段歩行が困難な方を介助者一人の操作で安全に階段昇降ができる「ステアチェア」は、サンワの長きに渡る技術開発から生まれた特殊設計のゴムクローラーが、階段の段鼻を確実にグリップし、昇降スイッチを押すと階段を昇降し、スイッチから指を離せば階段上でも確実に停止します。専用充電器は自然に放電した分を補充し続ける機能があるため、常時コンセントに挿したままでも安心してお使いいただけます。万が一に備え、災害時の避難用としてもお使いいただけます。

ステアチェアの詳細は、QRコードより
取扱説明動画をご覧ください。




POINT 1

胸部・腹部・脚部固定ベルトが搭乗者の転落を防ぎます。



POINT 2

スイッチから指を離せば電磁ブレーキが働き、その場で安全に停止します。

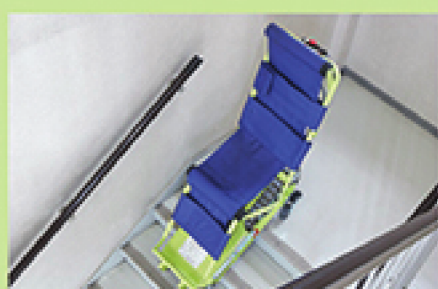

ステアチェアが選ばれ
6つのポイント
SIX POINTS



階段上下避難



バッテリー駆動

POINT 3

平地は車輪で軽く手押し走行ができます。



POINT 4

特殊設計のゴムクローラーが階段をしっかりとグリップします。



POINT 5

簡単に折りたたみができ、収納スペースを取りませ
ん。



POINT 6

階段途中で動かなくなってもブレーキ強制解除機能により安全に下降できます。



■介護保険レンタルでご利用の場合

・操作者の条件

年齢：原則16才以上70才以下であること 病歴：発作性の病気を持っていないこと
身長：原則150cm以上 体重：原則45kg以上
平衡感覚：階段を後ろ向きに上がることができる
四肢の状況：両手・両足に不自由がないこと 聴覚・視覚：特に聴覚・視覚に問題がないこと


・その他

利用者の条件：特になし
禁止事項：△本製品は操作講習を受けていない方は操作できません。
講習の概要：操作講習は貸与事業者が行いますが、受講できる方に条件があります。

■使用環境の条件

階段傾斜角度：38度以下 段鼻間の距離：340mm以下
段鼻R：R9mm以下 蹴上寸法：190mm以下
※らせん階段・曲がり階段でないこと ※段鼻に欠けがないこと
※滑り止めモールドがあった場合、確実に固定されていること
※濡れて滑りやすい状態や油膜が付着・凍結した階段では使用しないこと

■許容階段寸法 (単位:mm)

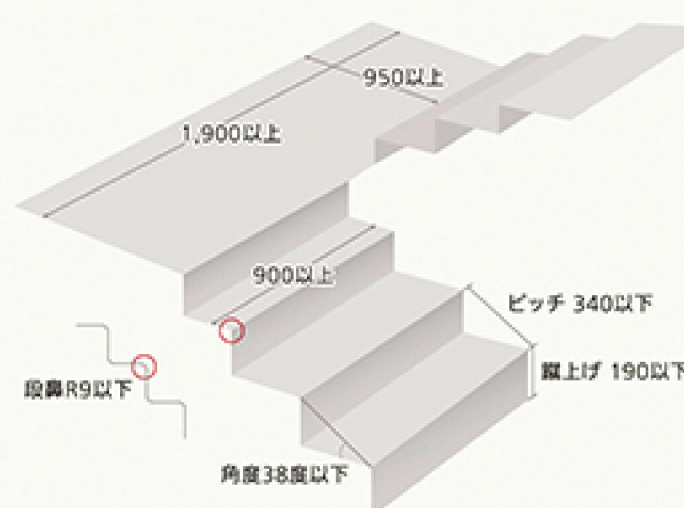

■仕様

名 称	ステアチェア	ブ レ ー キ	無防磁作動型電磁ブレーキ1個
型 式	SC6-1	バ ッ テ リ ー	小型制御弁式鉛蓄電池(PXL12180)または(PE12V17)
全 長	1,346mm(収納時1,100mm)	自 動 充 電 器	入力:AC100V-50-60Hz 出力:DC12V-5A
全 幅	421mm(収納時421mm)	使 用 時 間	約30分/一充電あたり
全 高	890mm(収納時482mm)	階 段 上 昇 速 度	約22段(6.7m)/分(搭乗者130kg時)
最 大 荷 重	130kg(1名)	階 段 下 降 速 度	約33段(10.2m)/分(搭乗者130kg時)
重 量	49kg(バッテリーバック含む)	最 大 階 段 角 度	38度
モ ー タ ー	永久磁石式直流モーター1個	T A I S コ ー ド	00412-000021

※この仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

本製品は、操作講習を受けていない方は操作できません。