

UD-CHAIR

TAISコード No.00412-000023

介助者の
負担軽減に!

災害時の
避難に!

Photo:H.Shima



ポイント1

クローラーが階段の角をしっかりと噛みながら昇降するため、安定性があります。



ポイント3

安全を考えて、補助者を付けて2人での操作を推奨します。



ポイント2

平地では車いす感覚でご利用いただけます。




ポイント4

本体は簡単に折りたたむことができます。スタンド・カバーをオプションでご用意しております。

※介護保険レンタルの場合、本体のみです。

許容階段寸法 (単位:mm)

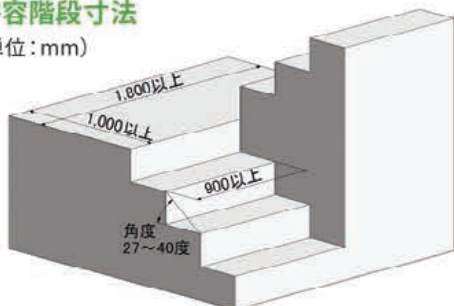

濡れたりしてすべりやすい階段では使用できません。

UD-CHAIR仕様

型 式	UD-0119-101S
使用時寸法 (W×H×D)	520 × 1080 × 1020 mm
収納時寸法 (W×H×D)	520 × 1080 × 270 mm
重量	30.5 kg (バッテリー含む)
最大荷重	120 kg
対応階段角度	27 ~ 40 度
昇降速度	約 45 段/分 ※ 4 段階可変可能
モーター	DC 36V / 15.6 Ah
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
充電時間	約 5 ~ 6 時間 ※ 使用状況により異なります
付属品	専用バッテリー / 専用充電器 / ヘッドレスト
オプション	予備バッテリー / 専用スタンド / ダストカバー

※階段での操作は特に危険が伴うため、取扱説明書を熟知し訓練を行ったうえでご使用ください。
※操作は体力面も考慮し操作を行ってください(必ずしも誰もが操作出来る訳ではありません)。
※操作は必ず靴・スニーカーなど、すぐに脱げない履物で操作してください(サンダル・ハイヒールなどはNG)。
※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

※原則2名で操作を行ってください。
※最大荷重はあくまで機器に乘車できる最大の重量です。操作する方ご自身の体力や乗車者の体重を考慮し操作を行ってください。

カタログ管理番号 F28-01

株式会社サンワ

<https://www.sunwa-jp.co.jp/>

■ 本 社 営 業 部 〒350-1325 埼玉県狭山市根岸571
■ 西日本営業所 〒672-8071 兵庫県姫路市飾磨区横2-126

TEL.04-2954-6611 (代) TEL.079-231-1005

FAX.04-2954-6617 FAX.079-231-1006

